

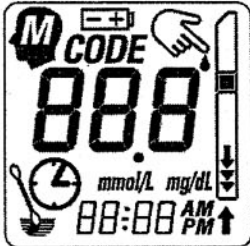


Comprobación de la pantalla del medidor OneTouchGlucoTouch®

Es importante que compruebe la pantalla antes de cada análisis.

Para comprobar que todos los símbolos de la pantalla funcionan correctamente:

- Pulsar y soltar el botón azul de encendido. La pantalla completa aparecerá durante 3 segundos cuando encienda el medidor.
- Observar atentamente la pantalla para asegurarse de que todos los "segmentos" o componentes de la pantalla se encienden antes de realizar un análisis (consulte la figura 2 que aparece a continuación). En el manual de usuario del medidor OneTouchGlucoTouch®, hay una ilustración similar para comprobar que la pantalla funciona correctamente.

Figura 2

COMPROBACIÓN DE PANTALLA	EJEMPLO DE COMPROBACIÓN DE PANTALLA	EJEMPLO DEL RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN
Pantalla que funciona correctamente	Pantalla sin algunos segmentos	Resultado identificable, pero incorrecto
		
Aparecen todos los segmentos. La pantalla funciona correctamente.	Algunos segmentos no aparecen. El mensaje estará incompleto.	En este ejemplo, el resultado 120 es en realidad 420, como muestran en gris los segmentos que faltan.

Si descubre en algún momento que la pantalla no funciona correctamente, no debe utilizar el medidor y debe llamar inmediatamente.

Línea de Atención Personal de LifeScan:

☎ 900 100 815 (llamada gratuita)