


# Protocolo de seguridad en la **dispensación de gafas de presbicia**

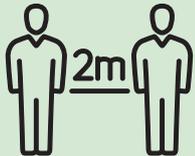

Se mantendrá una distancia de seguridad de dos metros



El paciente se desinfectará las manos con solución hidroalcohólica



Si es posible, proporcionar guantes para probarse la montura



Las monturas seleccionadas se colocarán en un recipiente previamente desinfectado



Desinfectar las monturas que se hayan probado



## Desinfección de monturas:

Algunos disolventes pueden estropear las lentes y la montura, por lo que **se recomienda contactar con el fabricante** para conocer la mejor manera de desinfección

## Algunos fabricantes aconsejan...



Introducir la gafa en agua tibia y **lavarla suavemente con un jabón neutro**. Frotar suavemente todas las superficies



**Evitar** utilizar **alcohol, acetona, disolventes agresivos y jabones de cocina**, ya que pueden dañar los tratamientos de las lentes y las monturas



Secar la montura suavemente, con un **pañó o gamuza de microfibra** específico para las gafas o en su defecto un pañó de algodón sin pelusas



Se pueden desinfectar las gafas con una **solución de peróxido de hidrógeno 3%** (10 volúmenes), **diluida en agua**. Esta solución se debe preparar a diario



Se pueden utilizar **sprays limpiadores específicos para gafas** que no dañan las lentes



Se pueden utilizar **sprays detergentes y antiempañamiento** si se utiliza mascarilla